



Crystal Peeling & Cryo Modelling EXCELLENCE ®

Description & Instructions

E-mail: info@oxynergy.com
Site Internet : www.oxynergy.com

Cryo & Dermabrasion ®

1. Légende
2. Description
 - 2.1 A propos
 - 2.2 Fonction
3. Règles de sécurité
 - 3.1 Précautions
 - 3.2 Incidents
 - 3.3 Indications
4. Installation
5. Programmes
 - 5.1 Abrasion
 - 5.2 Aspiration
 - 5.3 Cryo
 - 5.4 Nettoyage
 - 5.5 Heure
6. La poudre
7. Le manipulateur
8. Données techniques
 - 8.1 Données générales
 - 8.2 Maintenance
9. Garantie

Cryo & Dermabrasion ®

1. Légende

Boutons et indicateurs

Ecran LCD indiquant le traitement en cours, la puissance et la durée du traitement.

+ / - : puissance (augmente ou diminue la force d'aspiration)

Valid : Touche de validation

Stop : (une pression) stop (deux pressions) arrêt complet retour au menu d'accueil.

2. Description


2.1 A propos

Nous utilisons un appareil de peeling de microcristaux disposant d'un niveau abrasive adaptable. Le peeling de microcristaux élimine les cellules mortes de l'épiderme ainsi que la pollution et autres dépôts incrustée dans la peau. Cette technique corrige aussi les imperfections comme les cicatrices, vergetures etc....

Principaux facteurs :

- Qualité ultra pure des cristaux,
- Forme des particules,
- Angle de projection des cristaux sur la peau, (applicateur breveté)
- Niveau d'abrasion adaptable pour un maximum de sécurité.

Le peeling de micro cristaux est une approche efficace et sûre du rajeunissement cutané sans chirurgie. Des résultats visibles dès la première séance, quelque soit le type ou la couleur de la peau. Cette technique stimule la production de nouvelles cellules, de collagène et dans un même temps favorise la pénétration de l'oxygène.

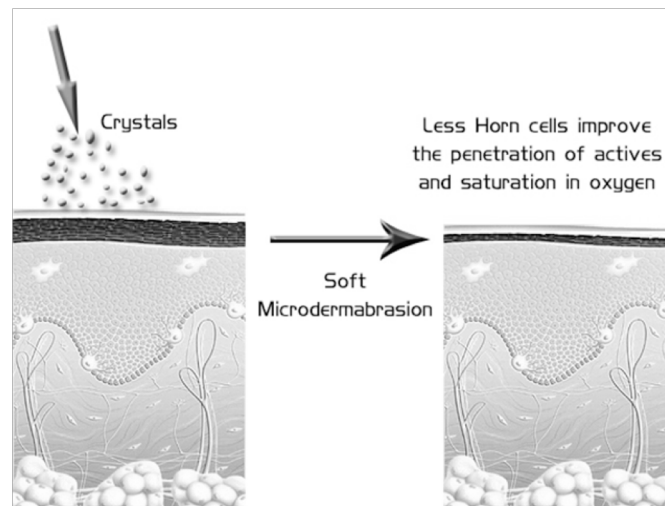

2.2 Fonction

Des microcristaux sont projetés avec un angle de 45° sur la peau puis aspirés ainsi que les cellules mortes. Par effet d'aspiration la microcirculation est aussi augmentée localement. Un traitement de 20 min garantit un peeling efficace.

3. Règles de sécurité

3.1 Précautions

Il est très souhaitable de suivre les indications suivantes.

- Durant le programme de nettoyage diriger l'applicateur vers le sol pour éviter toute projection de poudre dans les yeux.
- Avant de débiter le traitement essayer sur votre main ainsi que sur celle de votre patient pour observer la réaction de la peau.
- Protéger les yeux Durant le traitement.
- Quand l'applicateur est en contact avec la peau maintenir la zone traitée tendue à l'aide de vos doigts. Ceci donne plus de confort à votre patient et une meilleure efficacité.
- Ne pas appuyer sur la peau avec l'applicateur.
- Eviter les grains de beauté.
- Bien laisser les bouches de poudre fermés.
- Ne travailler que sur une peau préalablement nettoyée.
- Avant d'éteindre votre machine appuyer toujours 2 fois sur STOP.
- A la fin du traitement éliminer les cristaux résiduels.

3.2 Incidents

Incidents	Possibilités	Solutions
La poudre n'arrive pas ou l'aspiration est très faible	Bouchon des bocaux mal fermés	Refermer correctement le ou les bocaux
	Tube bouché	Effectuer un cycle de nettoyage
	Tube percé	Changer le tube
	Fuite dans un bocal	Nettoyer les joints et remonter l'ensemble
	Embout hors d'usage	Changer l'embout
	Bocal de poudre neuve Presque vide	Remplir le bocal de poudre
	Fuite manipulateur	Changer le joint torique
	Bocal de poudre usée plein	Vider le bocal
	Filtre du bocal poudre usage encrassé	Faire un cycle de nettoyage Nettoyer le filtre par trempage dans le trichloréthylène
	Tubes non connectés	Vérifier les connexions
L'appareil ne fonctionne pas	Vérifier si la machine est branchée ainsi que le secteur	
	Rien ne s'allume	Vérifier le raccordement au secteur et les fusibles qui se trouvent dans le bloc secteur.

3.3 Contres indications

- Eviter les peaux sensibles
- Eviter les dermatoses (acné, psoriasis, eczéma)
- Eviter les fragilités capillaires (couperose)
- Eviter les lésions (boutons, cicatrices actives, plaies)

4. Installation

Brancher le câble fournit au secteur et à l'arrière de la machine.

Mettre en route la machine à l'aide du bouton situé à l'arrière de la machine (position 1)

L'écran affiche alors:

"Welcome Oxynergy"

Vous accéder ensuite au menu et aux différentes options:

"Abrasion", "Vacuum", "Cryo", "options", "nettoyage"

Choisir un des programmes avec les touches +/- puis validez en appuyant une fois sur la touché VALID

5. Programmes

5.1 Abrasion

Affichage de l'écran

P:

T: 00:00 (temps du traitement) TRAITEMENT (fonction active)

Appuyer sur VALID ou + pour débiter le traitement

>> Pour ajuster la puissance:

Affichage de l'écran:

P: □ □ □ (Puissance)

T: 01:10 TREATMENT

Le temps est comptabilisé automatiquement. Afin d'ajuster la puissance appuyer sur les boutons +/-.

>> Pour arrêter le traitement:

Appuyer une fois sur STOP.

Affichage de l'écran:

P: □ □ □ (intensité)

T: 01:10 TREATMENT

- Pour reprendre le traitement appuyer une fois sur VALID le temps ne sera pas remis à zéro.
- Afin de revenir au menu de départ appuyer encore une fois sur STOP.

5.2 Vacuum

La fonction vacuum sert à réaliser un massage local par aspiration. Ainsi vous obtiendrez une augmentation locale de la microcirculation et un effet raffermissant. Il s'agit du même fonctionnement que ABRASION mais sans projection de poudre.

5.3 Cryo

Affichage de l'écran

T: 00°C

T: 00:00 (temps du traitement) TRAITEMENT (fonction active)

Appuyer sur VALID ou - pour débiter le traitement

>> Pour ajuster le froid:

Affichage de l'écran:

P: - 07°C (température relative)

T: 01:10 TRAITEMENT

Le temps est comptabilisé automatiquement. Afin d'ajuster la température appuyer sur les boutons +/- . Quand la température arrête de clignoter le manipulateur a atteint la température demandée.

- Afin de revenir au menu de départ appuyer encore deux fois sur STOP.

5.4 Nettoyage

La fonction nettoyage doit être employée entre chaque patient afin de nettoyer la poudre résiduelle dans les tubes ainsi que les filtres.

Pour réaliser un nettoyage sélectionnez Nettoyage dans le menu et appuyer une fois sur la touché « VALID ».

Il est recommandé de changer l'embout entre chaque patient ou de le nettoyer avec de l'alcool 70°.

5.5 Heure

Afin de régler l'heure sélectionnez dans le menu "OPTION" puis «HEURE »

L'écran affiche:

Régler l'heure:

15:39

MAI 20

Avec le bouton + et - mettez l'heure à jour ainsi que la date.

6. La poudre

Suite à chaque traitement:

- Vérifier que le bocal de poudre neuve est plein
- Vider le bocal de poudre usagée
- Bien fermer les deux bocaux.

La poudre ne doit JAMAIS être réutilisée.

7. Le manipulateur

Entre chaque patient changer l'embout plastique ou le nettoyer avec de l'alcool 70°.

8. Données techniques

8.1 Données générales

Secteur: 110–220 V /50–60 Hz
Consommation: 120 W
Aspiration maximale: 4,2 m³/Heure
Pression maximale: – 920 Mm hg (1 bar)
Commande: par microprocesseur
Affichage: LCD 2x20
Caractères alpha numériques négatif bleu
Digital management
Niveau sonore: 40 dB
Capacité des bocal: 100 cm³
Taille: l: 300 mm
Hauteur: 180 mm
Profondeur: 300 mm
Poids: 13 Kg
Température d'usage: + 10 of + 40 °C
Humidité relative : 30 of 75 %
Sécurité: Classe 1 type BT (norme NF EN 60335–1)
Manipulateur : Plastique injecté
Granulométrie cristaux : de 100 of 150 µm
Sortie pression : par connecteur rapide

8.1 Maintenance

Nettoyer la face avant à l'aide d'un chiffon humide.
Nous recommandons une révision tout les 2 ans.

Nous rejetons la responsabilité et les dommages causés à un tiers dans le cadre d'une utilisation incorrecte de notre machine.

9. Garantie

Cette machine doit être manipulée par une personne qualifiée. L'équipement doit être branché sur un secteur adapté (16A).

Garantie 2 ans à compter du jour de la facturation pour tout défaut de fabrication. Les frais de transport sont à la charge du client. Cette garantie ne couvre pas les dommages, accidents ou dans l'éventualité ou la machine a été manipulée par une personne autre que notre distributeur agréé.