



Oxygène Excellence ®

Description et instructions

E-mail: [contact@oxynergy.com](mailto:contact@oxynergy.com)  
Website : [www.oxynergy.com](http://www.oxynergy.com)

# Oxygène Excellence ®

1. Contrôles
2. Opération du système
3. Programmes
  - 3.1. Soins depresso-massage
  - 3.2. Soins oxygène
4. Description
  - 4.1. A propos
  - 4.2. Fonctions
5. Instructions de sécurité
6. Installation du système
7. Nettoyage et désinfection
8. Incidents
9. Maintenance
10. Données techniques
11. Garantie

# Oxygène Excellence ®

## 1. Contrôles

### ÉCRAN LCD

Vous indique les menus et les soins

### VALID

Entrer dans un sous-menu ou un soin / débiter un soin

### STOP

Retourner au menu principal ou précédent / arrêter le soin

+

Faire défiler le menu / augmenter ou modifier le niveau du soin

-

Faire défiler le menu / diminuer ou modifier le niveau du soin

## 2. Opération du système

- Vérifier que l'appareil est bien adapté à votre secteur (110 V ou 220 V). Dans le cas contraire modifier le voltage. Le système est toujours livré sur la position 220 V.

- Brancher le système au secteur avec le câble fournit.

- Allumer l'appareil en mettant le bouton à l'arrière sur la position I.

L'écran LDC va alors s'allumer et inscrire quelques secondes avant d'afficher le menu principal:

**“Bienvenue Oxynergy”**

Menu principal

OXYNERGY MASSAGE  
SOINS OXYNERGY  
LANGUES

### 3. Programmes

Dans le menu principal

**OXYENERGY MASSAGE** (soins de depresso massage)  
**SOINS OXYENERGY** (soins d´oxygénothérapie)  
**LANGUES** (changer de langue english/español/français)

Faire défiler le menu avec les touches **+/-** pour sélectionner le soin désiré. Appuyer ensuite sur la touche **VALID** pour entrer dans le sous-menu.

Pour changer de langue, entrer dans le menu **LANGUES**, sélectionner la langue désirée avec les touches **+/-**, puis appuyer sur **VALID** et ensuite **STOP** pour retourner au menu principal.

#### 3.1. Soins depresso massage

##### **OXYENERGY MASSAGE**

Sous-menu:

**PULSÉ**  
**CONTINU**

Sélectionner un des 2 soins avec les touches **+/-**, ensuite appuyer sur **VALID** une première fois pour entrer dans le soin. Pour revenir au menu précédent appuyer une fois sur **STOP**.

**PULSÉ**     (réglage de la fréquence des pulsations)

Ce soin est un depresso massage en alternance, l´aspiration étant adaptée pour traiter le visage, le cou ou des zones locales sur le corps. (Attention aux zones sensibles et aux capillaires superficiels). L´aspiration est bloquée a un niveau modéré (10 litres / minute) et vous pouvez adapter la fréquence (4 niveaux). Le deuxième niveau étant recommandé et présélectionne.

Avec les touches **+/-** sélectionner la fréquence des pulsations, avec la touche **VALID** débiter le soin.

**CONTINU**

Ce soin est un depresso massage en continu pour traiter le visage ou le corps. (Attention aux zones sensibles et aux capillaires superficiels).

#### 3.2. Soins oxygène

##### **SOINS OXYENERGY**

Sous-menu:

**ATOMISATION** (soins continu)  
**MESO-OXYGEN** (soins d´oxygène pulsé)  
**DIFFUSION** (soins d´oxygène pulsé)

Sélectionner un des 3 soins avec les touches **+/-**, ensuite appuyer sur **VALID** une première fois pour entrer dans le soin. Pour revenir au menu précédent appuyer une fois sur **STOP**.

**ATOMISATION**     (débit d´oxygène – 3 litres / 6 litres / 10 litres / 15 litres)

Ce programme est destiné à la pulvérisation de sérums sur le visage et le corps en flux continu. Les deux premiers niveaux étant conseillés pour traiter le visage et les deux derniers pour le corps. Le deuxième niveau est présélectionné (6 litres d'oxygène 95% pureté).

À l'aide des boutons +/- sélectionner le débit désiré, appuyer une fois sur la touche **VALID** pour débuter le soin. Appuyer une fois sur **STOP** pour arrêter le soin et deux fois pour revenir au sous-menu.

**MESO-OXYGEN**     (débit d'oxygène – 3 litres / 6 litres / 10 litres / 15 litres)

Ce programme est destiné à faire pénétrer par impulsion d'oxygène les sérums au plus profond de l'épiderme (mésothérapie par oxygène). Le flux est pulsé à un rythme de 300 ms. Vous pouvez ajuster le débit d'oxygène (augmente la pression) ce qui vous permet de travailler les zones sensibles et le corps. Le niveau 2 est présélectionné (6 litres d'oxygène 95% pureté pulsé à 300 ms).

À l'aide des boutons +/- sélectionner le débit désiré, appuyer une fois sur la touche **VALID** pour débuter le soin. Appuyer une fois sur **STOP** pour arrêter le soin et deux fois pour revenir au sous-menu.

**DIFFUSION**     (débit d'oxygène – 3 litres / 6 litres / 10 litres / 15 litres)

Ce programme est destiné à oxygéner et faire pénétrer par impulsion d'oxygène les crèmes au plus profond de l'épiderme (diffusion par oxygène). Le flux est pulsé à un rythme de 800 ms. Vous pouvez ajuster le débit d'oxygène (augmente la pression) ce qui vous permet de travailler les zones sensibles et le corps. Le niveau 2 est présélectionné (6 litres d'oxygène 95% pureté pulsé à 300 ms).

À l'aide des boutons +/- sélectionner le débit désiré, appuyer une fois sur la touche **VALID** pour débuter le soin. Appuyer une fois sur **STOP** pour arrêter le soin et deux fois pour revenir au sous-menu.

## 4. Description

### 4.1. A propos

Une faible vascularisation et une forte demande en énergie afin de supporter la régénération cellulaire sont les caractéristiques du vieillissement prématuré de la peau. Le traitement topique par l'oxygène améliore la vascularisation et augmente la synthèse de collagène. Notre système d'atomisation est spécialement adapté pour appliquer des concentrés avec précision en profondeur. Il permet d'atteindre une forte saturation intercellulaire en oxygène et ainsi répondre à la demande en énergie des cellules.

Le concentrateur traite l'air ambiant à travers des filtres moléculaires afin d'éliminer les particules et le nitrogène. L'oxygène est alors stocké dans un réservoir et le flux est régulé par un détendeur.

L'oxygène excellence® Augmente la concentration de l'air ambiant de 20% en oxygène jusqu'à 96%. Nous utilisons ensuite ce gaz très riche en oxygène comme vecteur pour faire pénétrer les sérums dans la peau.

### 4.2. Fonctions

Voici en quelques lignes l'essentiel à savoir pour comprendre le mode de fonctionnement.

– 2 compresseurs à commande électrique aspirent l'air ambiant à travers un filtre à poussières et un filtre à fines particules et envoient cet air comprimé dans un système à 12 filtres zéolite.

- Les filtres ont la propriété de retenir l'azote contenu dans l'air.
- L'air qui sort des récipients est enrichi en oxygène. Il traverse ensuite un régulateur de pression pour arriver à l'orifice de sortie.

## 5. Instructions de sécurité

Pour votre propre sécurité, veuillez tenir compte des points suivants:



- Veuillez lire avec attention le présent mode d'emploi.
- N'utilisez le système qu'aux fins auxquelles il a été conçu.
- Pendant le traitement, il se peut que vos vêtements soient en contact avec de l'air enrichi en oxygène, ce qui veut dire qu'ils seront plus facilement inflammables. C'est la raison pour laquelle il est interdit de fumer, d'amener une flamme nue (bougies) ou de faire du feu à proximité de l'appareil.

Ces précautions s'imposent aussi après la séance jusqu'à ce que la teneur en oxygène des vêtements se soit normalisée. Soyez conscient qu'il y va de votre sécurité et de celle de votre patient.

- Vérifier que la tension du secteur correspond à la tension de fonctionnement de l'appareil.
- Pendant son fonctionnement, le système aspire l'air ambiant. Il ne faut donc pas recouvrir le boîtier de l'appareil. Veuillez notamment à ce que la fente d'aération soit toujours dégagée.
- Veillez à ce que l'air inspiré ne contienne ni fumée, ni humidité, ni impuretés d'autre nature.
- L'air inspiré sert aussi au refroidissement, veillez à ne pas placer le système devant un appareil de chauffage ni à l'exposer à la lumière solaire directe.
- Ne mettez pas le système dans une pièce humide ou dehors. L'absorption permanente d'humidité abîme les tamis moléculaires et peut être à l'origine d'une défaillance du système non garantie.
- N'oubliez pas de nettoyer le filtre à poussière chaque semaine.
- Afin d'éviter toute contamination bactérienne, consultez le chapitre « nettoyage ».
- N'utilisez que les produits Oxynergy. N'utilisez aucun lubrifiants (graisse, huile ou alcool).
- Après une durée d'inutilisation prolongée (plusieurs mois), faites vérifier la concentration d'oxygène par votre distributeur agréé.
- Utilisez le dispositif uniquement avec les produits recommandés. Le parfait fonctionnement de l'appareil ne peut être garanti en cas d'utilisation d'autres produits.
- Notez que tous les droits relatifs à la garantie et à la responsabilité seront annulés si les accessoires conseillés dans le mode d'emploi ou les pièces de rechange d'origine ne sont pas utilisés. L'usage d'articles étrangers à l'appareil peut entraîner des dysfonctionnements et l'incompatibilité.

## 6. Installation du système

Déterminez l'emplacement le mieux adapté en tenant compte des conseils suivants :

- Choisissez un endroit bien aéré où le système ne vous gênera pas.
- Installer le système sur une surface plane dans un endroit sec.
- Eviter de placer le système près d'une flamme ou d'une source de chaleur.
- Eviter de placer le système sur un tapis épais pour garantir la bonne circulation de l'air.

## 7. Nettoyage et désinfection

- Changer les tubes plastiques tous les mois.
- Nettoyer les applicateur avec de l'alcool 70%
- Attention a ne pas introduire d'eau ou tout autre liquide dans les tubes.
- Garder le câble d'alimentation en bon état et propre.

## 8. Incidents

Anomalie	Cause	Que faire?
Pas de bruit de moteur, l'écran LCD ne s'allume pas.	Fusibles défectueux	Changer les fusibles
	Pas de tension secteur	Etablir l'alimentation électrique.
Faible débit d'oxygène	Fente d'aspiration bouchée, filtre bouché, humidité dans les filtres moléculaires.	Nettoyer la fente d'aspiration de l'air. Ou contacter SAV.
Plus de flux pulsé	Electrovalve endommagée	Contacteur SAV.
Pas de débit au niveau de l'applicateur bien que l'oxygène sorte de l'appareil. Aucune alarme ne se déclenche.	Tuyaux mal raccordés. Tuyaux coudés. Joint en mauvais état et défaut d'étanchéité d'un raccord vissé.	Contrôler l'étanchéité de tous les raccords de tuyaux et de tous les vissages. Remplacer les joints si besoin est.

Si vous ne parvenez pas immédiatement à remédier à un default, veuillez prévenir votre revendeur. Les appareils défectueux doivent être retournés au constructeur (Oxynergy Paris).

## 9. Maintenance

L'appareil doit toujours être retourné dans son emballage d'origine; Nous vous conseillons donc de conserver le carton.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien uniquement chez votre distributeur agréé.

- Après 5000 heures (voir le compteur). Par sécurité prévoir le retour de la machine en avance.
- Après un an de service
- Si votre système est hors service depuis plus de 6 mois

La maintenance inclue:

- Changement des filtres
- Nettoyage
- Vérification complète de l'équipement
- Inspection visuelle:
  - Dommages mécaniques, en particulier le cordon de branchement au secteur.
  - Placement des labels de sécurité
  - Dommages éventuels des tubes
- Effectuer le contrôle final conformément au protocole ou aux instructions de service et de réparation.

## 10. Données techniques

CATEGORIE.....CE  
DIMENSIONS LxHxl in cm.....55x95x55  
Poids.....35 kg  
TEMPERATURES  
- Opération +10°C to +30°C  
- Stockage - 20°C to +55°C  
NIVEAU SONORE.....≤ 40 dB(A)

O <sub>2</sub> (valeurs après 10 min. a +20°C, 50% humidité)	95 +1/-3 vol% O <sub>2</sub> à 1-4 l/min 95 +/- 3 vol% O <sub>2</sub> à 6l/min
O <sub>2</sub> à 2000 m	90 +/- 3 vol% O <sub>2</sub> à 5l/min
débit	3 to 15 l/min.
Service	5000 heures ou 1 an

## 11. Garantie

A compter de la date d'achat, nous garantissons en usine le système pour une durée de 2 ans et maximum 5.000 heures les filtres moléculaires et dans des conditions normales d'utilisation que le produit ne présente pas de défauts.

La garantie ne sera accordée que sur présentation d'une facture mentionnant le vendeur, date d'achat et numéro de série. Tout système n'étant pas muni de sa plaque d'identification n'est plus couvert par la garantie.

Sont exclus de la garantie:

- le non-respect du mode d'emploi
- les erreurs de manipulation
- les frais de transport
- l'intervention d'une personne non habilitée pour réparer l'appareil
- le fonctionnement défectueux résultant de la force majeure, comme le tonnerre, etc....
- Les dommages de transport résultant d'un emballage non-conformité lors du retour à l'expéditeur.
- le non respect des délais de maintenance
- la détérioration par suite de la durée d'utilisation du produit et l'usure normale ainsi que les éléments dits consommables, comme :
  - Les filtres
  - Les articles à usage unique, etc.
  - Les manipulateurs
- La non utilisation de pièces de rechange d'origine.

Oxynergy dégage toute responsabilité en cas de dégâts engendrés par des défauts, dans la mesure où ils n'ont pas été causés intentionnellement ou par négligence grave ou en cas d'atteinte par imprudence au corps ou à la vie.

Oxynergy se réserve le droit, soit d'éliminer le défaut, de livrer un produit sans défaut ou de réduire en conséquence le prix d'achat.

Les droits de garantie légaux restent inchangés.