



OXYENERGY ENHANCER ®
ADMINISTRACIÓN CELULAR

Manual de usuario

Muy importante:

- 1-Siempre enchufar el Enhancer a una red trifásica (con tierra).
- 2-En funcionamiento no dejar el cable del cabezal sobre el aparato.
- 3-En funcionamiento nunca digirir el cabezal en dirección del aparato.
- 4-Al final del tratamiento dejar encendido el dispositivo durante mínimo 15 minutos para que se enfría el dispositivo.

OXYENERGY ENHANCER ®

1. Control
2. Descripción
 - 2.1 A propósito
 - 2.2 Funciones
3. Seguridad
 - 3.1 Precauciones
 - 3.2 Fallo técnico
 - 3.3 Indicaciones
4. Instalación
5. Programas
 - 5.1 Low
 - 5.2 Medium
 - 5.3 High
6. Aplicadores
7. Datos técnicos
 - 7.1 General
 - 7.2 Mantenimiento
8. Garantía

OXYENERGY ENHANCER ®

1. Control

Botones y indicadores

Pantalla LCD indica el tipo de tratamiento, la potencia y el tiempo.

On/Off: Empezar / parar el tratamiento

Low : Para tratamientos faciales para pieles sensibles

Medium : Tratamiento facial todo tipo de piel

High: Tratamiento corporal

2. Descripción

2.1 A propósito

El OXYENERGY ENHANCER es un Nuevo sistema de administración transdérmicas. Se puede introducir cualquier tipo de substancia sin aguja y sin ningún tipo de shock eléctrico al nivel mas profundo de la piel. El abanico de tratamientos es muy amplio: celulitis, flacidez, medicina deportiva, medicina estética, arrugas, manchas, estrías etc. Como indicado cualquier tipo de substancia se puede administrar con el MESO-ENERGY directamente en el corazón de la célula: Inico, non-ionico, aceites, emulsiones, cremas etc.).

El OXYENERGY ENHANCER funciona gracias a un tipo de ondas electromagnéticas atómicas, non ionizantes (ondas hectometricas), El OXYENERGY ENHANCER produce un estado de estrés biológico de las células y una destabilización parcial del potencial de la membrana celular. Este mecanismo es temporal y reversible como demostrado en varios estudios clínicos. Este mecanismo aumenta de 400 veces la permeabilidad de la piel y de las células.

La velocidad de absorción es de 0,09 g por minuto para cremas y suele ser mas mayor para aceites.

El OXYENERGY ENHANCER no presenta ningún riesgo de quemadura, descarga eléctrica, inflamación y es 100% sin dolor. Es un equipo compacto fácil de transportar.

2.2 Funciones

Las ondas tienen un potencial muy elevado (400-2000Volts) y una baja intensidad, son ondas hectometricas pulsadas con una frecuencia de 10 ms.

3. Seguridad

3.1 Precauciones

- Paciente con pace maker o problemas de corazón
- Paciente con implantes metálicos
- Embarazo
- Epilepsia
- Paciente sufriendo de enfermedad de degenerencia o cáncer..
- Infección.
- Después de un peeling, acto medico esperar que la piel se recupera
- Zona abdominal durante menstruaciones
- Flebitis

3.2 Fallo técnico

Llamar servicio técnico (+34) 972 17 32 68 para España.

3.3 Indicaciones

ESTETICA

Obesidad y celulitis
Flacidez
Rejuvenecimiento facial
Cicatrices
Estrías
Acne

MEDICAL

Alteraciones reumatológicas y neuromusculares
Trauma muscular
Neuralgias

4. Instalación

Conectar el cable de alimentación al sector y al Oxynergy Enhancer

Conectar el aplicador a la maquina siempre antes de encender el dispositivo

Encender el aparato con el botón localizado atrás del sistema

La pantalla señala

“Welcome”

Y después la pantalla de tratamiento

Seleccionar el programa con los botones LOW – MEDIUM – HIGH y on/off para empezar el tratamiento.

5. Programas

5.1 Low

En el programa LOW el dispositivo produce un 30 % de la potencia máxima, es recomendado por un tratamiento facial para pieles sensibles

5.2 Medium

En el programa MEDIUM el dispositivo produce un 60 % de la potencia máxima, es recomendado por un tratamiento facial para todas pieles.

5.3 High

En el programa HIGH el dispositivo produce un 100 % de la potencia, es recomendado por un tratamiento corporal.

6. Cabezales

La maquina esta proporcionada para trabajar con 2 tipos de aplicadores (facial y corporal). Siempre conectar el aplicador con el sistema apagado. Para cambiar de aplicador para el tratamiento, apagar el sistema y cambiar de aplicador. Limpiar los aplicadores con alcohol entre los pacientes.

Se recomienda cambiar los aplicadores cada año.

7. Datos técnicos

7.1 General

Alimentación: 110-220 V /50-60 Hz
Consumo: 120 W
Controlado con microprocesos
Pantalla: LCD 2x20
Management digital
Nivel de sonido: 3 dB
Tamaño: l: 200 mm * 100 mm * 200 mm
Peso: 2 Kg.
Temperatura de funcionamiento: + 10 a + 40 °C
Humedad relativa : 30 a 75 %
Seguridad: Clase 1 tipo BT (norma NF EN 60335-1)

7.2 Mantenimiento

Cada 5 años
Cambiar los aplicadores cada año

8. Garantía

El MESO ENERGY tiene que ser usado por una persona cualificada. OXYNERGY ENHANCER no se hace cargo de los daños ocurrido durante los tratamientos y de los efectos secundarios.

Este sistema tiene una garantía de 5 años por cualquier fallo técnico. La garantía no cubre cualquier daño ocurrido por transporte, cualquier shock al sistema, o en el caso que el sistema ha sido modificado o abierto por una tercera persona.

La garantía no cubre los gastos de envió del dispositivo al servicio técnico o de re-envío al cliente.