

CRYSTAL PEELING EXCELLENCE

ESTUDIO CLINICO Dr De Goursac (Francia)

La Dermabrasion es una técnica que consiste en eliminar las capas superficiales de la epidermis con una proyección de micro cristales de oxido de aluminio. Este proceso estimula la síntesis de colágeno y de una piel nueva.

La profundidad del tratamiento depende:

>> **Del flujo de cristales**

>> **Del tiempo de tratamiento en un mismo lugar**

Indicaciones:

- Cicatrices
- Pigmentación
- Arrugas
- Estrías
- Flaccidez
- Daños solares

Los tratamientos siguientes fueron realizados con el aparato Oxynergy Paris Crystal peeling excellence por el Dr De GOURSAC (France)



- Eliminación de las pequeñas cicatrices desde la tercera sesión
- Mejora muy importante de las cicatrices profundidad

El nombre de tratamientos depende de la profundidad de la cicatriz o mancha

Con 4 sesión / 10 días entre los tratamientos



Queratosis acneica

2 a 3 tratamientos pueden quitar la queratosis. La profundidad de abrasión se tiene que ajustar a la localización de la hiperpigmentación.




PUNTOS IMPORTANTES

- Evitar la zona de contorno de ojos y proteger los ojos de las proyecciones de cristales
- Guardar la piel tensa con los dedos
- No aplicar presión sobre la piel con el aplicador
- Para la abrasión si la piel sangra
- Siempre limpiar la piel antes del tratamiento

Se recomienda aplicar una máscara de colágeno con crío o oxígeno después del tratamiento para aliviar la piel

Tratamiento:

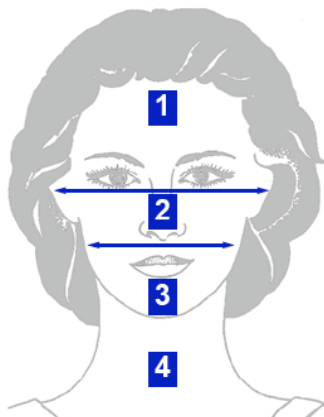

Dividir el rostro en 4 zonas

1. Superior
2. Media
3. Inferior
4. Cuello

