

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИЛИНГА И КРИО МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ доктора De Goursac (Франция)

Дермабразия является методом по удалению поверхностных слоев кожи при помощи потока микро-кристаллов. Стимулирует обновление кожи.

Это лечение может быть поверхностным и глубоким, зависит от:

- Потока и плотности потока кристаллов
- Времени лечения

Показания

- Шрамы
- Пигментные пятна
- Морщины
- Растяжки
- Вялость кожи
- солнечные повреждения

С помощью устройства для пилинга и крио моделирования было проведено следующее лечение доктором De Goursac (Франция)



- Удалены небольшие шрамы после 5 сеансов
- Значительные улучшения глубоких шрамов

Количество сеансов зависит от вида шрамов

После 4-х сеансов лечения / 10 дней между сеансами



Угревой кератоз.

2 и 3 процедуры могут вылечить большую часть угревого кератоза. Глубина абразивного вмешательства должна быть скорректирована с учетом локализации гиперпигментации.




### Важные моменты

- Защитите глаза пациента во время лечения
- Придерживайте кожу плотную пальцами при выполнении дермабразии
- Никогда не надавливайте аппликатором на поверхность кожи
- Завершите процедуру, если возникло кровотечение
- Всегда выполняйте работу на чистой коже

Мы рекомендуем применять коллагеновые маски Oxunergy Paris и крио для разглаживания кожи.

Как выполнять лечение:

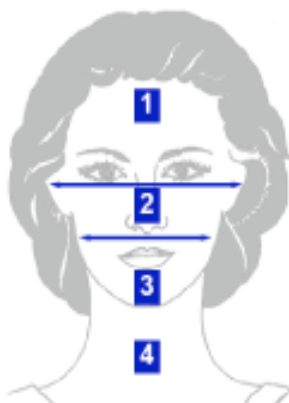

Лицо поделено на разные области:

1. Верхняя
2. Средняя
3. Нижняя
4. Шея

